

**NUOVO CONCETTO DI CONTENZIONE - COMPRESSIONE  
UNICO AL MONDO (Brevetto **BV SPORT**® )**



**Gamma  
PRORECUP**



**Gamma  
CONFORT**



**Gamma  
BOOSTER**


**Accelera** il recupero

**Migliora** la prestazione

**Riduce** il rischio di lesioni

(Se portata regolarmente)

Utilizzate da oltre **2500 atleti ad alto livello sportivo**  
tra cui **230 campioni del mondo e campioni olimpici**

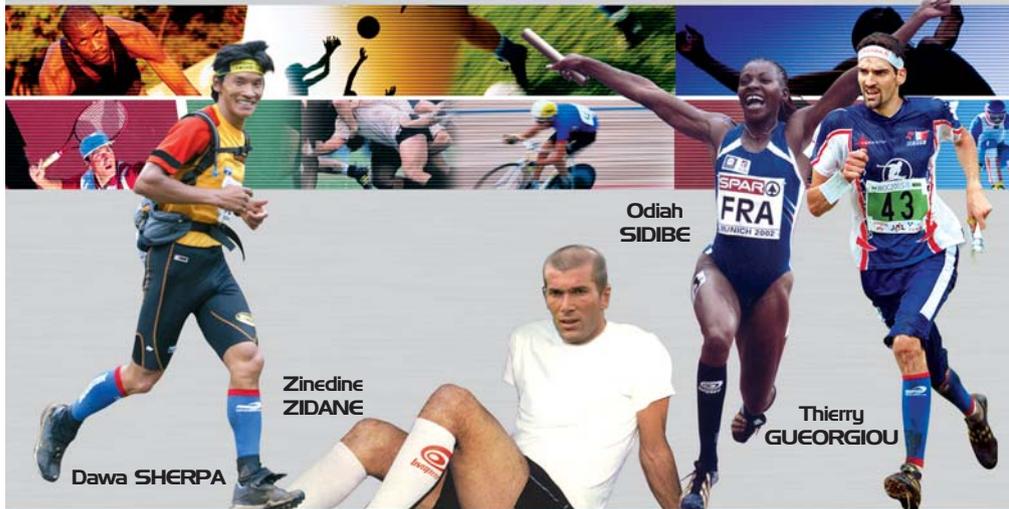

Dawa SHERPA

Zinedine  
ZIDANE

Odiah  
SIDIBE

Thierry  
GUEORGIOU


**INFORMAZIONI e CONTATTI:**

BV SPORT - Via C. Betteloni 39/c - 37131 Verona - Tel. 045 8400 943 - Fax 045 520 101

**www.bvsport.it**



**Boost your  
performances**

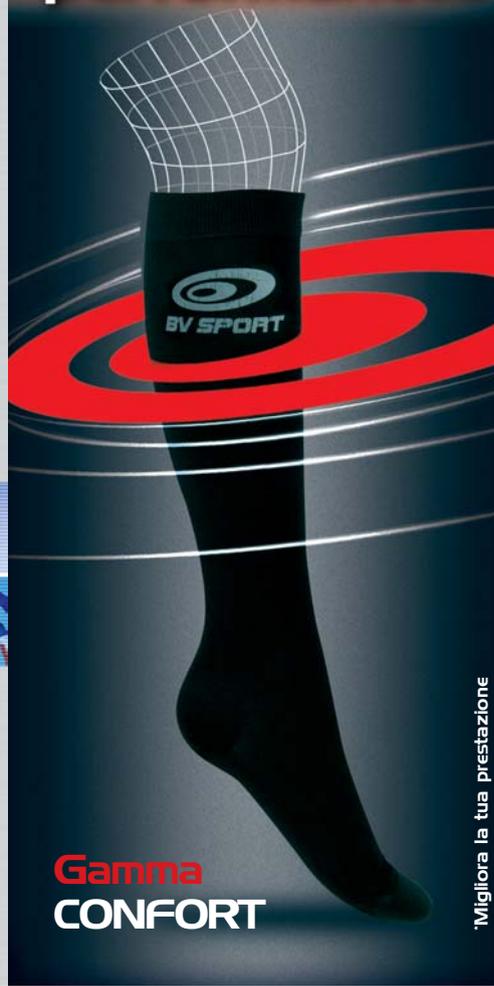

**Gamma  
CONFORT**



**BV SPORT**®  
LA REFERENZA DELLA  
CONTENZIONE NELLO SPORTIVO

**BV SPORT**® si differenzia dalla contenzione  
tradizionale (decescente) attraverso  
delle **PRESSIONI ADATTATE AL POLPACCIO**  
e delle pressioni lievi o quasi nulle alla caviglia

**CERTIFICATE ATTRAVERSO**

- **STUDI CLINICI**  
- Pubblicati e presentati in congressi internazionali
- **TECNICHE ULTRA-MODERNE**  
- Ecodoppler a colori realizzato per mezzo di uno specifico bracciale®  
- R.M.N.



Clairefontaine Euro 2000



ECODOPPLER A COLORI



MISURATORE DI PRESSIONE  
AMPVE®



**EFFETTO APONEUROSIS DELLA CONTENZIONE  
BV SPORT**® in immagini di R.M.N.

Migliora la tua prestazione

## PRINCIPIO D'AZIONE

**BV SPORT®**

Eliminazione delle TOSSINE



## PER INDOSSARE BV SPORT®

in maniera OTTIMALE, rispettando la contenzione elastica del tessuto, vi consigliamo di procedere secondo le seguenti istruzioni:

- Calzate **BV SPORT®** (come mostrato nella Fig.1.)



Fig.1

- Infilate il piede facendo coincidere il vostro tallone con quello della calza e fate scorrere **BV SPORT®** sopra la caviglia (Fig.2 e 3).



Fig.2

Fig.3

- In più riprese e con delicatezza, fate salire **BV SPORT®** fino al ginocchio facendo attenzione a NON LASCIARE PIEGHE (Fig.4).



Fig.4

Fig.5

- Fig. 4 e 5: CORRETTO POSIZIONAMENTO

SI CONSIGLIA DI NON TIRARE TROPPO LE CALZE **BV SPORT®** PER NON MODIFICARE IL LORO CORRETTO POSIZIONAMENTO E LA LORO STESSA EFFICACIA

## CONTRO INDICAZIONI:

- Malattie delle arterie, venose e linfatiche degli arti inferiori
- Dermatosi trasudanti e infettive, piaghe o ulcere cutanee
- Allergia ai materiali contenuti in **BV SPORT®** (cotone, lycra, polyamide...).

## PRECAUZIONI D'IMPIEGO:

- In caso di formicolio, crampi o dolori a livello della gamba o del piede, sfilare **BV SPORT®** e consultare il proprio rivenditore.
- Togliere o abbassare il BOOSTER nel caso in cui sopraggiungano dei disturbi durante uno sforzo
- **BV SPORT®** non deve sostituirsi alle calze o ai collant per la contenzione delle malattie venose.
- Non indossare **BV SPORT®** quando ci si corica.

**TAGLIE:** L'utilizzatore comunicherà, con precisione, le misure richieste affinché venga fornita una calza conforme la propria struttura.

## MANUTENZIONE:

**BV SPORT®** deve essere lavata a mano, in acqua tiepida saponata o in lavatrice senza lavaggio detergente (massimo 40°C). Deve essere asciugata adagiata su un piano, lontano da fonti di calore (né radiatori, né essiccatrice). Lavare le calze **BV SPORT®** significa ridonar loro le proprietà tessili e la loro efficacia.



# Gamma CONFORT

Gamma complementare al modello **PRORECUP** ne prolunga gli effetti benefici. Grazie alle sue proprietà tessili innovative è molto comoda e può essere indossata durante tutta la giornata. Defatica e rilassa le gambe ed è adatta ad attività professionali in cui si cammini, si stazioni seduti o in piedi per lungo tempo. È raccomandata durante i viaggi in aereo, macchina, pullman...

## I "VANTAGGI" BV SPORT®

### IL RECUPERO

L'effetto **COMPRESSIONE** specifico **BV SPORT®** libera rapidamente il polpaccio da tutte le tossine (acido lattico, radicali liberi, CO<sub>2</sub>...).

### LA PRESTAZIONE

L'effetto **CONTENZIONE** (o **APONEUROSIS**), grazie alle pressioni adattate al polpaccio, permette una migliore ossigenazione e favorisce il rendimento muscolare durante la prestazione.

### PORTATO REGOLARMENTE

Il concetto **BV SPORT®** riduce **IL RISCHIO DI LESIONI** (tendiniti, stiramenti,...)

## Contenzione PROGRESSIVA

Brevetto



Il Centro di Ricerca e Sviluppo della società **BVSPORT®** concentra i propri lavori sul comportamento dei vasi sanguigni (arterie e vene) nello sportivo. Il **POLPACCIO** rappresenta un organo "bersaglio" in quanto si comporta come un **CUORE PERIFERICO**. Per rispettare la morfologia della gamba e apportare il massimo del **CONFORT** e la maggior **EFFICACIA**, proponiamo 13 **TAGLIE** per ogni gamma. Su richiesta, **BVSPORT®** può essere realizzata sulla base delle **MISURE ANATOMICHE** e delle **PRESSIONI VENOSE MUSCOLARI** (vedi: [www.bvsport.it](http://www.bvsport.it))